

Oxivir® Excel™ Wipe CE

Bredspektret rengørings- og desinfektionswipes til ikke-invasivt medicinsk udstyr og ikke-porøse hårde overflader

Beskrivelse

Diversey Care Oxivir Excel Wipe CE er en klar-til-brug ét trins rengørings- og desinfektionswipe med bredspektret effektivitet og korte kontakttider. Produktet er baseret på Diversey Care's patenterede Accelereret Hydrogenperoxid formulering. Kan anvendes på ikke-invasivt medicinsk udstyr og på hårde ikke-porøse overflader.

Egenskaber

- Baktericidal, Virucidal, Gærdræbende
- Desinficerer på blot 1 minut
- Positiv sikkerhedsprofil for brugere og overflader
- Nemt og bekvemt, kræver ingen forberedelse eller tekstilvask
- Effektivt rengøringsmiddel
- Parfumefri
- Det aktive indhold nedbrydes til vand og ilt
- Ingen efterskylning nødvendig

Fordele

- Den brede effekt sikrer de højeste niveauer af patientbeskyttelse. Omfattende testet efter europæiske normer og effektivt overfor en lang række patogener. Har fuld virucidal effekt, herunder overfor *Poliovirus*, *Adenovirus* og *Murine norovirus*. Vurderet som effektiv overfor alle kappebærende vira som *HIV*, *HBV*, *HCV*, *Influenza*, *Vacciniavirus* og *Coronavirus*.
- Korte kontakttider hvor overfladen holdes våd, så desinfektionsmidlets effekt sikres
- Fremragende rengøringssevne
- Sikker at anvende i nærheden af patienter og besøgende, irriterer ikke hud og øjne
- AHP-formuleringen er skånsom på overflader, hvilket forlænger udstyrets levetid
- Nemt at anvende, doseringsfejl undgås
- Ingen risiko for krydskontaminering da wiper kun anvendes én gang
- Velegnet til brug i højrisikoområder i sundhedssektoren, herunder operationsstuer, intensivafdelinger, neonatalafdelinger og patientværelser.

Brugsanvisning

Applikation

1. Fjern grov snavs.
2. Åben wipe-pakken, udtag en enkelt wipe og luk låget
3. Anvend wipen på overfladen, sørg for at hele overfladen vædes, lad lufttørre
4. Sørg for at overfladen forbliver våd under hele kontakttiden
5. Skift wipen når den ikke længere væder overfladen. Når synligt snavset eller ved skift til andet rengøringsområde

Vigtigt: Må ikke blandes med andre produkter. Må ikke anvendes på overflader, som er følsomme overfor vand eller syre.



Oxivir[®] Excel[™] Wipe CE

Bredspektret rengørings- og desinfektionswipes til ikke-invasivt medicinsk udstyr og ikke-porøse hårde overflader

Tekniske data

Udseende:	polypropylene wipe
Relativ vægtfylde [20° C]:	1,000
pH-værdi i brug:	1,95
Holdbarhed:	720 dage
Duft:	neutral

Ovennævnte data er baserede på normal produktion, må ikke anvendes som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

For fuld information om håndtering og bortskaffelse af dette produkt henvises til separat sikkerhedsblad. Opbevares tillukket i den originale flaske. Undgå ekstreme temperaturer. Reagerer med oxiderbare stoffer.

Øvrige forhold

Ved anvendelse som anbefalet kan Oxivir Excel Wipe CE anvendes på de fleste, almindeligt forekommende overflader.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer

Mikrobiologisk information

Effektivitet testet i overensstemmelse med: EN13727, EN13624, EN14476.

Claim		Kontaktid
<i>Bactericidal</i>	RTU	5 min
<i>Yeasticidal</i>	RTU	5 min
<i>Virucidal</i>	RTU	30 sek

Emballagestørrelser

Varenummer	Forpakning	Type
100941439	12 x 100 stk.	Bøtte med engangswipes