
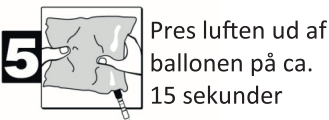


Instruktion

Vent mindst 15 minutter efter indtagelse af alkohol, før du tager testen i brug.

Aflæs resultatet 2-15 minutter efter luften er presset ud af ballonen.

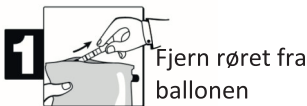

Distributør:
ValMed A/S,
2840 Holte
info@valmed.dk

Producent:
Contralco
34150 Gignac
France

VALMED

Tilstedeværelse af alkohol i udåndingsluften ses tydeligt, da det hvide reaktionsmiddel vil skifte farve til rød. Hvis den røde farve når hen til eller over den sorte markering i midten, er alkoholpromillen over 0,5.

Skifter reaktionsmidlet ikke farve, er der ikke alkohol i udåndingsluften.

