

Narkotikatest

Stav – Urintest

Denne Narkotikatest er enkel og simpel at anvende, og kan hurtigt teste for 5 forskellige Narkotika: Amfetamin, Kokain, Ecstasy, Opiater (bl.a. Heroin) Cannabis (Hash).

Det skal dog understreges at denne test alene registrerer de nævnte 5 typer narkotika og således ikke tester for øvrige typer narkotika.

Endvidere skal det understreges, at der kan være forskellige forhold, som resulterer i en falsk positiv test. Testen bør derfor ikke bruges, som et entydigt bevis på indtagelsen af narkotika men som et redskab til dialog med den testede person.

Testen:

Når Narkotika er indtaget vil der udskilles metabolitter, som kan spores i urinen.

Stofferne kan typisk spores i urinen fra ca. 2 timer og op til 4 dage efter de er indtaget.: Amfetamin (3 timer til 4 dage), Kokain (2 timer til 3 dage), Ecstasy (2 timer til 3 dage), Opiater (2 timer til 3 dage), Cannabis (2 timer til 4 dage).

Gode råd inden du tester:

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden testen udføres.

Testen kan udføres på et vilkårligt tidspunkt af døgnnet

Indhold i æsken:

1 stk. foliepakke indeholdende 1 stk. Narkotikatest.

Hvad skal jeg ellers bruge:


En ren og tør beholder til at opsamle urinen i
Et ur med sekundviser

Sådan udføres testen:

1. Åbn foliepakningen og tag testen ud.
2. Foliepakningen åbnes, hvor der er et lille hak i siden af foliepakningen.
3. Tag hættten af testen
4. Peg den absorberende del af testen nedad, og sæt den ned i urinen i mindst 10 sekunder. Vær sikker på, at urinen er ved "max." linien på testen.

5. Sæt hættten på igen og læg den på en plan ikke-absorberende overflade
6. Vent på at resultatstregerne dukker op i aflæsningsvinduet. Det er vigtigt, at resultatet aflæses efter nøjagtig 5 minutter.

Vigtigt ! Resultatet af testen skal aflæses efter maksimalt 5 minutter. Se bort fra eventuelle ændringer efter dette tidspunkt.

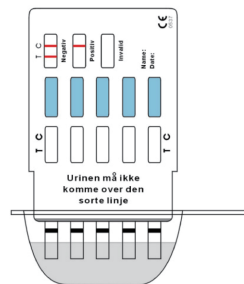

AMP = Amfetamin
COC = Kokain
MDMA = Ecstasy
OPI = Opiater
THC = Cannabis

Aflæsning af resultat:

Kommer der en streg både ud for "T" og "C", er testen negativ.
Kommer der kun en streg ud for "C" er testen positiv for den givne Narkotikum, der står på strimlen lige over.
Der SKAL være et svar i alle 5 aflæsningsvinduer.



1:
Hvis der kommer en streg ud for "C", er testen positiv for det givne Narkotikum.

Testen har fundet metabolitter for det givne Narkotikum, og der er derfor meget stor sandsynlighed for at det er blevet indtaget.

2:
Hvis der kommer en streg ud for både "T" og "C" er testen negativ over for den givne Narkotikum.

3 og 4:
Kommer der ikke nogen streger eller kommer der kun en streg under "T" er testen ugyldig og bør smides væk.
Udfør en ny test, og følg brugsanvisningen omhyggeligt.
Fremkommer denne test også med et ugyldigt svar, bør du kontakte forhandleren og oplyse LOT nr., som er trykt på foliepakningen.

Testens begrænsninger:

- Hvis en urin prøve er for tynd (udvandet), kan indholdet af metabolitter vise sig ikke at være repræsentativt. Hvis man stadig mistænker brug af Narkotika, bør man gentage testen igen efter et par timer.

- Som det er med enhver diagnostisk procedure bør en eventuel bekræftende test udføres af en læge, hvis der ønskes yderligere sikkerhed.
- Testen kan ikke skelne mellem lægeordnede stoffer og et misbrug.
- Lavt indhold af metabolitter kan også give et negativt resultat. Dette er såfremt der kun er indtaget meget små mængde Narkotika'
- Et positivt svar kan i specielle tilfælde skyldes visse ingredienser i mad (eksempelvis vil et stort indtag af blå birkes kunne give en positiv test for Opiater (fx Heroin)).

Vigtig information:

- Åben kun foliepakken lige inden testen skal bruges
- Opbevar foliepakningen utilgængeligt for børn
- Bortskaf testen sammen med normalt husholdningsaffald efter brug
- Anvend ikke testen, hvis folietesten er beskadiget
- Testen kan ikke genbruges
- Testen er kun til udvortes brug, testen må ikke sluges.
- Testen må ikke bruges efter udløbsdato
- Testen må ikke fryses, eller udsættes for direkte sollys
- Opbevares bedst mellem 4-30° C

Spørgsmål og svar:

Der er stor farveforskel i de forskellige testvinduer. Er der en årsag til dette ?

Nej. Farveforskellen har ingen betydning for resultatet

Er det muligt at aflæse resultatet senere end 5 minutter efter testens gennemførelse?

Testens resultat skal være aflæst senest 5 minutter efter gennemførelsen. Ligger testen mere end 5 minutter, kan resultatet ændre sig til falsk svar.

Testen viser negativ, men der er en formodning om at der ER indtaget Narkotika. Hvad skal jeg gøre?

Sørg for at urinen ikke er blevet udvandet (at der ikke er indtaget for stor mængde væske før urinopsamlingen), og gentag testen. Vær opmærksom på, at der ikke er brugt for meget eller lidt urin ved testens udførelse.

Hvordan kan medicin påvirke testresultatet ?

Læs altid producentens instruktioner til eventuel medicin du indtager, inden testen gennemføres. Eksempelvis kan visse typer af astma medicin samt indtagelse af kodimagnyl påvirke testen

Testen er positiv – hvad gør jeg ?

Det er vigtigt, at overveje muligheden for at medicin eller fødevarer har påvirket resultatet. Det er derfor vigtigt at gå i dialog med den testede person for at finde en eventuel årsag til et falsk positivt resultat. Kontakt eventuelt egen læge for at undersøge forholdene yderligere.

Forhandler:

ValMed A/S
Dronninggaards Allé 68
2840 Holte
Telefon: 27349742 eller mail: info@valmed.dk

Fabrikant:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No.8 Lizhishan Road, Science City,
Luogang District, 510663,
Guangzhou P.R. China



Beskyttes mod sollys



Opbevares mellem 4-30° C



Opbevares tørt



Kan ikke genbruges