



WipeClean Chlorine Disinfection

Desinfektionsklud



Engangsklude til nem og hurtig high level desinfektion af overflader, der tåler klor.

Anvendelsesområde

Til desinfektion af overflader i sundheds- og plejesektoren. Beregnet til brug på områder med "high level" desinfektionskrav samt til overfladedesinfektion af rene, mindre overflader, der tåler klor. Ikke velegnet til brug på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug. Effektiv mod bl.a. C. diff. og M. norovirus. PT2 biocidprodukt til professionel brug.

Velegnet til brug på hospitaler, plejecentre og hjemmeplejen til desinfektion af f.eks. toiletstole, inventar og kontaktpunkter mm.

TIL PROFESSIONEL BRUG

Produktegenskaber

Engangsklude til nem og hurtig overfladedesinfektion. Kludene indeholder den rette mængde desinfektionsvæske og er klar til brug lige fra pakken. Indeholder aktivt klor frigivet fra Natriumhypoklorit. Uparfumeret.

De bløde og behagelige klude er fremstillet af polyester, og er designet til at efterlade væsken på overfladen. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

Kludene er pakket i lufttætte forpackninger med nem lukning som sikrer, at de ikke tørrer ud. Kludene er foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis, klar til brug.

WipeClean Chlorine Disinfection findes i følgende størrelser:

5241 Small: 20 x 30 cm. der rækker til 1 m²

5242 Large: 30 x 40 cm. der rækker til 2,5 m²

Opfylder kravene i EN14885 og har dokumenteret baktericidal, mykobactericidal, fungicidal, virucidal og sporicidal effekt. Produktet er derfor bl.a. virksomt mod Coronavirus, C. diff, M. norovirus, Adenovirus og Poliovirus.

Vurderet af CEI til High level desinfektion.

pH: 8,5 – 9,5 (brugsopløsning)

Brugsanvisning

Kludene er klar til brug og skal anvendes på rengjorte og tørre overflader. Benyt personlige værnemidler i henhold til lokale arbejdsinstruktioner. Brug en klud til at desinficere, hold kluden fladt og tør overfladen af i S-form, så hele overfladen er våd. Brug en ny klud hvis kluden bliver snavset eller tør. Ved synligt snavsede overflader rengøres overfladen inden desinfektion. Må ikke anvendes på overflader, der er følsomme overfor klor. Lad overfladen tørre naturligt i overensstemmelse med den angivne kontakttid. Genbrug ikke en klud. Luk altid emballagen efter brug.

Ikke beregnet til håndhygiejne.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN13727	Bactericidal Effect	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min
EN13697	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	2 min
EN16615	Bactericidal Effect	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	2 min
EN13624	Fungicidal Effect	A. brasiliensis C. albicans	2 min
EN13697	Fungicidal activity	A. brasiliensis	15 min
EN16615	Yeasticidal Effect	C. albicans	2 min
EN14348	Tuberculocidal/Mycobactericidal Effect	M. terrae M. avium	1 min
EN14476	Virucidal Effect	Poliovirus Adenovirus M. norovirus	1 min
EN17126	Sporicidal Effect	B. subtilis	5 min
	Sporicidal Effect against C. diff.	B. cereus	5 min
		C. difficile	3 min

Indhold

Ingrediens	Effekt
Natriumhypochlorit-opløsning (mængde af aktiv chlorin)	>1,0 g/kg Aktivt stof

Opbevaring

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed: 18 måneder fra produktionsdato, 30 dage fra åbning.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Anvendelses- og miljø sikkerhed

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse / Varenummer

Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Package type
24 x 5 stk	5242	5701684524220	5701684524213	Wipes
20 x 10 stk	5241	5701684524121	5701684524114	Wipes

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.