



WipeClean Chlorine Disinfection

Desinfektionsservett



Engångsdukar för snabb och enkel desinfektion av ytor som tål klor. Färdig att använda direkt från förpackningen. Används på rengjorda och torra ytor. Ytan måste vara blöt enligt kontakttiden som anges på förpackningen för optimal effekt. Dokumenterad effekt på bakterier, virus (inklusive Coronavirus) svamp och sporer.

Användningsområde

Färdigimpregnerad desinfektionsservett med aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit för alla ytor som tål klor.

Produktegenskaper

Engångsduk för snabb och enkel ytdesinfektion. Dukarna innehåller den rätta mängden desinfektionsvätska och är redo att användas direkt. Oparfymrad.

De mjuka och behagliga dukarna är tillverkade av polyester och designad för att avge vätska till ytan för att ge bästa möjliga desinfektionseffekt.

Dukarna är förpackade i en lufttät förpackning som har en enkel men säker förslutning som garanterar att dukarna inte torkar ut. Dukarna är både X och Z vikta, så att de enkelt kan tas ut ur förpackningen och är klara för användning.

WipeClean Chlorine Disinfection wipes finns i följande storlekar:

5241 Small: 20 x 30 cm, täcker ca 1 m²

5242 Large: 30 x 40 cm, täcker 2,5 m².

Uppfyller kraven i ramverket EN14885 och har dokumenterad effekt på bakterier, mykobakterier, svamp, virus samt sporer.

Bruksanvisning

Dukarna är redo att användas direkt ur förpackningen och ska användas på synligt rena och torra ytor. Ta en duk från förpackningen och bearbeta ytan så den är fuktig under hela kontakttiden. Kasta den använda duken i soporna och stäng förpackningen efter användning. Ej avsedd för handhygien. Använd handskar enligt EN374.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN13727	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min
EN13697	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	2 min
EN16615	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	2 min
EN13624	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min
EN13697	Fungicidal activity	A. brasiliensis	15 min
EN13697 EN16615	Yeasticidal activity	C. albicans	2 min
EN14348	Mycobactericidal activity	M. terrae M. avium	1 min
EN14476	Virucidal activity	Poliovirus Adenovirus M. norovirus	1 min
EN17126	Sporicidal activity	B. subtilis B. cereus C. difficile	5 min 3 min

Sammansättning

Aktiva ämen

Natriumhypokloritlösning >1,0 g/kg
(mängden aktivt klor)

Förvaring

Förvaras torrt, frostfritt och ej i direkt solljus.
Öppnad förpackning hållbar i 30 dagar. Öppnad förpackning hållbar 18 månader från produktion.

Utseende och doft

Utan färg och parfym.

Användar- och miljösäkerhet

Klassificerad som biocid. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen för användning.

Förpackningsmaterial	Emballaget runt servetterna är gjort av PET/PE plast och sorteras som plast, transportförpackningen som kartong. Använda servetter slängs i hushållsavfallet. Oanvänd produkt sorteras som farligt avfall.			
Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
	24 x 5 st	5242	5701684524220	5701684524213
Ytterligare information	Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com .			